

DREI nr kat. 1729

- kolorowy ekran dotykowy 5,7"
- intuicyjna, łatwa obsługa
- inteligentne głowice zabiegowe
- 59 gotowych programów zabiegowych o różnych poziomach intensywności, dla różnych obszarów twarzy i ciała

Radiofrekwencja

częstotliwość: 1 MHz
 max napięcie: 800 Vpp
 cyrkoniove głowice zabiegowe:
 głowica do twarzy: 1 bipolarna Ø30 mm
 głowice do ciała: 1 bipolarna Ø50 mm
 1 unipolarna Ø50 mm

Kawitacja

częstotliwość: 40 kHz
 moc maksymalna: 3 W/cm²
 tryb pracy: ciągły lub pulsacyjny
 głowica płaska Ø55 mm

Elektroporacja

max napięcie: 70Vpp ±10%
 częstotliwość nośna: 2,5 kHz ±3%
 częstotliwość modulacji: 2 Hz


Wymiary: wysokość 1150 mm
 szerokość 660 mm
 głębokość 550 mm

Waga: 21 kg

Efekty zabiegów



Kawitacja
 Program: lokalna tkanka tłuszczowa
 Produkt: Essential Contour Oil, G-5 Gel

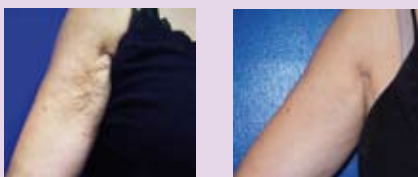

Radiofrekwencja
 Program ujędrniający
 Produkt: Essential Firming Oil



DREI wykorzystuje zjawiska kawitacji ultradźwiękowej (40kHz), elektroporacji (modulowany prąd średniej częstotliwości) oraz stymulujące działanie fal radiowych.

» KAWITACJA

Kawitacja jest zjawiskiem fizycznym wywołanym działaniem fali ultradźwiękowej. Doprowadzona do ośrodka płynnego energia wywołuje efekt kompresji i dekompresji powodując powstawanie pęcherzyków, które akumulują energię. W wyniku nagromadzenia energii pęcherzyki ulegają implozji i mechanicznie oddziałują na otaczające tkanki, powodując rozerwanie błon komórek tłuszczowych. Zjawisko kawitacji wykorzystane w zabiegach DREI ma na celu doprowadzenie do trwałej destrukcji adipocytów.

» ELEKTROPORACJA

Elektroporacja jest zjawiskiem zachodzącym w błonach komórkowych oraz w warstwie rogowej naskórka. Na skutek działania złożonych impulsów prądowych następuje chwilowe, odwracalne otwarcie mikroporów, umożliwiając wprowadzanie w głąb skóry aktywnych składników zawartych w nowoczesnych produktach leczniczych i pielęgnacyjnych.

» RADIOFREKWENCJA POJEMNOŚCIOWA

DREI emituje fale radiowe (1 MHz) wytwarzane przez prąd wysokiej częstotliwości. Energia elektryczna zamieniana jest w energię elektromagnetyczną. Za pośrednictwem elektrod przykładanych do skóry dociera do tkanek. Pod wpływem działania pola elektromagnetycznego następuje wzbudzenie jonów. Tarcie cząsteczek powoduje wytworzenie ciepła wewnątrz tkanek. Zabieg RF polega na pojemnościowym podgrzewaniu tkanek. Pod wpływem wytworzonego ciepła uwalniane są opiekuńcze białka HSP. Następuje uporządkowanie struktur kolagenu oraz aktywacja fibroblastów do syntezy nowego kolagenu i elastyny. Rozpoczyna się proces regeneracji. Skóra odzyskuje jędrność, zwiększa się jej gęstość, napięcie i elastyczność, poprawia owal twarzy, spłycają zmarszczki, redukują blizny. Fale radiowe stymulują tkanki powierzchniowe i głębiej położone, poprawiają ich dotlenienie, odżywienie oraz mikrocyrkulację. RF dociera do głębokich warstw skóry i komórek tłuszczowych, wzrasta metabolizm komórkowy,

zwiększa się lipoliza. Na obszarach ciała radiofrekwencja stosowana jest głównie do regeneracji zwiótczałej skóry oraz do redukcji lokalnej tkanki tłuszczowej i cellulitu. Zabiegi DREI z wykorzystaniem fal radiowych są skuteczne i dają długotrwałe efekty. W trakcie zabiegu odczuwane jest przyjemne ciepło, które daje klientom poczucie odprężenia i relaksu.



- likwidacja lokalnej tkanki tłuszczowej i redukcja cellulitu
- ujędrnienie ciała, likwidacja zwiótczeń (brzuch, ramiona, biust, pośladki, uda)
- lifting twarzy, szyi, dekoltu - likwidacja zwiótczeń
- poprawa owalu twarzy
- redukcja tzw. „chomików”
- spłylenie fałdów nosowo-wargowych
- podniesienie podbródka
- wygładzenie zmarszczek, kurzych łapek
- wzrost elastyczności i napięcia skóry
- poprawa jakości skóry twarzy i ciała
- spłylenie blizn
- redukcja rozstępów
- przyspieszenie metabolizmu
- wzrost dotlenienia i odżywienia tkanek
- odprężenie mięśni

» INTELIGENTNE GŁOWICE ZABIEGOWE

DREI jest jedynym na rynku urządzeniem wyposażonym w cyrkoniowe głowice zabiegowe, które zapewniają optymalną efektywność (maksymalną moc), całkowite bezpieczeństwo (podgrzewają tkanki, lecz nie parzą) oraz mają długą żywotność. Generator prądu dostosowuje moc do przewodnictwa każdej osoby, przekazując jej optymalną dawkę energii, gwarantującą najwyższą skuteczność zabiegu.



» ŻELE ZABIEGOWE

Stosowane do zabiegów żele przewodzące zawierają aktywne substancje transportowane w głąb skóry na zasadzie mezoterapii bezigłowej. Żel zabiegowy G-5 do działania wyszczuplającym i przeciwcellulitowym zawiera w swoim składzie m.in. karnitynę, arnikę górską, kilka gatunków alg. Przyspiesza proces spalania tłuszczów, aktywuje metabolizm komórkowy, stymuluje mikrocyrkulację. Żel Toneactif zawierający m.in. kolagen, elastynę, algi ma znakomite działanie ujędrniające, uelastycznia skórę, odżywia, nawilża i rewitalizuje.

» OLEJE ESENCJONALNE

Innowacyjny protokół zabiegowy RF z zastosowaniem olejów esencjonalnych zapewnia optymalne wytworzenie ciepła w tkankach, dużą efektywność zabiegów i wyjątkowy komfort. Oleje nie zawierają wody, mają właściwości izolacyjne. Ciepło rozchodzi się od wewnątrz ku powierzchni skóry. Do zabiegów stosowane są trzy rodzaje olejów zawierających aktywne składniki: Essential Age (jojoba, oligopeptydy, retinol), Essential Contour (fucus, oligoelementy) i Essential Firming (gugulu, rose moschata, ekstrakt z kawioru).

